



Silikoninis gelis randams gydyti **Rystora**®



fotolia
by Adobe



leškokite vaistinėse ir
e-parduotuvėje
www.hifamed.lt

hifamed
higienai, farmacijai, medicinai

 <https://www.facebook.com/hifamed>

100%
medicininis
silikonas 15 ml
tūbelėje

#760

SANTARVĖJE SU JŪSŲ ODA



Silikoninis gelis randams gydyti



RYSTORA GYDYMO PRINCIPAS:

Plonu Rystora silikoninio gelio sluoksniu galima tepti bet kokį randą. Gelis nėra lipnus ar pernelyg drėgnas, jis nesukelia alerginės odos reakcijos. Plona plėvele padengia randą, aplink randą išsaugo odos drėgmę, todėl žaizda gyja greičiau, sumažėja kolageno formavimasis rande, oda tampa švelnesnė.

ĮSPĖJIMAI:

- Laikyti vaikams iki 3 metų amžiaus nepasiekiamoje vietoje, kad vaikas gelio negalėtų praryti.
- Nenaudoti ant atvirų žaizdų ar infekcijos pažeistos ir nesugijusios odos.
- Rystora gelio negalima tepti ant gleivinių ir akių!

**TINKAMAS VISIEMS RANDAMS
TEPAMAS TIESIOGIAI, NEREIKIA LAUKTI KOL IŠDŽIUS
SUMAŽINA RANDŲ HIPERPLAZIJĄ
SUMAŽINA RANDŲ BLUKIMĄ
TINKAMAS NET JAUTRIAI ODAI
PRALAUDUS ORUI IR DRĖKINANTIS ODA**

KAIP NAUDOTI Rystora® silikoninį gelį žaizdoms?

1 žingsnis

Įsitikinkite, kad randas yra švarus ir sausas. Jei buvo tepama kažkokiu tepalu ar geliu, randą reikia sausai nuvalyti.

2 žingsnis

Randą užtepti Rystora® geliu, jo netrinant ir nemasažuojant. Gelis turi pilnai uždenkti randą. Per dieną randą tepti 2-3 kartus.

3 žingsnis

Didesni ir senesni randai tepami iki 2 mėnesių. Esant ryškiai raudoniems ar tamsesniems randams, gydymas gali užtrukti 12 mėnesių ir ilgiau – ypač jei siekiama geresnio rezultato.

Rystora® silikoninis gelis randams gydyti yra saugi ir veiksminga medicinos priemonė, ženklinta CE. Tinka randams po traumų, operacijų ir nudegimų. Veiksmingai sumažina rando dydį, blyškumą, kietumą ir niežulį.

Gamintojas Fortune Medical Instrument Corp.

6 Fl., No.29, Sec.2, Jhongjheng E. Rd., 251 Danshuei Dist., New Taipei City, Taiwan

Įgaliotasis atstovas UAB „Interlux“, Aviečių g.16, LT-08321 Vilnius, www.hifamed.lt